

D-Dimer Control

D-Dimer Control

For In Vitro Diagnostic Use Only

REF	Contents	Lot Number	Expiration date
PTCC60023	1 concentration × 1 ml	1401	2022-11

مقدمه

این محصول به عنوان کنترل در تعیین مقدار D-دایمر پلاسما با استفاده از کیت D-دایمر شرکت پیشتاز طب مورد استفاده قرار می گیرد.

آماده سازی

کنترل به صورت مایع و آماده مصرف می باشد .

پایداری

قبل از باز شدن درب: تا تاریخ انقضاء در دمای °C 8 - 2

پس از باز شدن درب : به مدت 1 ماه در دمای °C 8 - 2

نکات ایمنی و هشدارها

1- این محصول صرفاً جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد.

2- در این محصول از پروکلین 300 به عنوان ماده نگهدارنده (Preservative) استفاده شده است، لذا از تماس مستقیم محلولها با دست و چشمها خودداری شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شسته شود. کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با محلولها رعایت گردد.

مقادیر کنترل

Test	Method	Value	Range	Unit
D-Dimer	Turbidimetric	1.0	0.82 - 1.18	µg/mL