

Lipid control 2

مقدمه :

کنترل لیپید 2 در سنجش HDL-C و LDL-C جهت انجام کنترل کیفی استفاده می گردد .

آماده سازی :

کنترل بصورت مایع و آماده مصرف می باشد .

پایداری :

قبل از باز شدن درب: تا تاریخ انقضا در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد
پس از باز شدن درب : به مدت 1 ماه در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد

هشدارها :

- این کنترل فقط جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد .
- در این کنترل از سرم انسان استفاده شده است . هرچند که بر اساس تست های انجام شده بر روی این کنترل ، مشخص گردیده است که از لحاظ anti-HIV antibodies ، anti-HCV antibodies ، HBs antigen منفی می باشد ، هنگام کار با این کنترل لازم است با آن همانند یک نمونه عفونی برخورد کرد .

بسته بندی :

1 عدد ویال 1 میلی لیتری

PTC0004

Lot No. : 1401

Exp Date. 2023.01

Test	Method	Value	Range	1s	Unit
HDL-C	Enzymatic	62	51 - 73	3.6	mg/dl
LDL-C	Enzymatic	77	65 - 89	4.0	mg/dl