

Lipid Calibrator

مقدمه :

کالیبراتور لیپید جهت کالیبراسیون در سنجش HDL-C و LDL-C استفاده می گردد .

آماده سازی :

کنترل بصورت مایع و آماده مصرف می باشد .

پایداری :

قبل از باز شدن درب: تا تاریخ انقضا در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد
پس از باز شدن درب: به مدت 1 ماه در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد

هشدارها :

- این کالیبراتور فقط جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد .
- در این کالیبراتور از سرم انسان استفاده شده است . هرچند که بر اساس تست های انجام شده بر روی این کالیبراتور ، مشخص گردیده است که از لحاظ HBs antigen ، anti-HCV antibodies ، anti-HIV antibodies منفی می باشد ، هنگام کار با این کالیبراتور لازم است با آن همانند یک نمونه عفونی برخورد کرد .

بسته بندی :

1 عدد ویال 2 میلی لیتری

PT-CC6002
Lot No : 1401
Exp Date : 2023.01

Test	Method	Concentration	Unit
HDL-C	Enzymatic	60	mg/dl
LDL-C	Enzymatic	64	mg/dl